

# Baby-Fix

Seitenlagerungsschiene  
mit Stabilisierungssteg

**AIDAMED**  
Diagnostik & Therapie



Pos. 1



Pos. 2

## Indikation:

- Korrektur von Kopfasymmetrien ( positive Beeinflussung des TAS)
- Therapie von Kopfgelenkstörungen (Geisel-Syndrom)
- Therapie von c-förmigen Säuglingskoliosen mit reflektorische Kopfgelenkstörungen

## Größe

## Alter

## Artikel Nr.:

## PZN

Baby-Fix\_6

0-3 Monate

2121-1

17282089

Baby-Fix\_9


ab 3 Monate

2121-2

17282273

## Vorteile:

- Nutzbarkeit für mehrere Monate bis Therapieabschluss
- Keine Gefahr von Druckstellen
- Rückenlage gewährleistet durch keilförmiges Schaumstoffkissen mit seitengleicher Druckverteilung
- 24h anwendbar unabhängig von Kleidungsstärke
- Wechselseitige Lagerung möglich
- Keine Kontraindikationen, keine Anwendungsrisiken

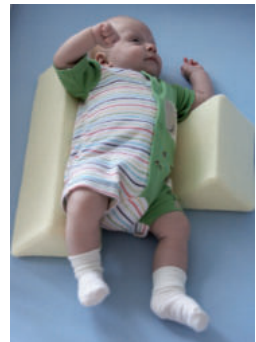

**AIDAMED e. K.**

Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg  
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11

Fax: + 49 911 92 867 13

www.aida-med.de

# Baby-Fix

Seitenlagerungsschiene  
mit Stabilisierungssteg

**AIDAMED**  
Diagnostik & Therapie



Die Anwendung dieser neu konzipierten Seitenlagerungsschiene ist denkbar einfach. Die Orthese besteht aus zwei Lagerungskeilen aus Schaumstoff, die mit einem Stabilisierungssteg verbunden sind. Der lange Keil (50 cm) liegt im Rücken des Kindes. Der kurze Keil (20 cm) dient zur Abstützung auf der Bauchseite.

Der Rückenkeil kann durch entsprechendes Wenden in der Höhe variiert werden. Immer jedoch liegt das Kind in der von Kinderärzten propagierten Rückenlage. Die Vorrichtung kann stationär im Bettchen verbleiben, so dass das schlafende Kind ohne Aufwecken die entsprechende Lage einnimmt. Ein Wegdrehen ist in der Position nicht möglich.

Das Kind bendet sich auch am nächsten Morgen noch in der gewünschten Lage. Durch die weichen Materialien entstehen keinerlei Druckstellen. Die Orthese ist so konzipiert, dass sie in jedem Kinderbettchen, als auch im Kinderwagen angewendet werden kann, unabhängig von der Benutzung einer Decke oder eines Schlafsackes.

Durch die weichen Materialien entstehen keinerlei Druckstellen. Das gilt auch für die Kinder, die beispielsweise aufgrund einer angeborenen Hüftdysplasie mit einer Abspreizschiene versorgt sind. Auch eine Gipsversorgung (Klumpfußgips) oder anderweitige Orthesen (Dennis-Brown-Schienen) behindern nicht. Zudem ist die Vorrichtung von der Größe des Kindes unabhängig und bis zum Therapieabschluss verwendbar.

Die Pflege der Lagerungsschiene ist einfach. Diese kann in die Wäsche, empfohlene Waschttemperatur 30°.

**Farben und Muster können vom Abbildungen abweichen.**



**AIDAMED e. K.**  
Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg  
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11  
Fax: + 49 911 92 867 13  
www.aida-med.de