

# „BabyFLEX“

## Pavlik-Bandage

**AIDAMED**  
Diagnostik - Therapie - Hygiene



**BabyFLEX** - Pavlik-Bandage führt durch die Beuge-Spreizstellung der Beine zu einer zentrierten Einstellung des Hüftkopfes und vermindert damit den Druck auf das knorpelige Pfannendach. Durch diese schonende, schmerzlose und funktionelle Behandlung im Säuglings- und Kleinkindalter kann durch die regelmäßige Anwendung das kindliche Hüftgelenk nachreifen.



### **Indikation:**

- Hüftluxation
- Hüftdysplasie

### **Kontraindikation:**

- nicht direkt auf verletzter, irritierter oder geschädigter Haut tragen

### **Größentabelle:**

Artikel Nr.	Größe	Brustumfang
800-X0	X0	35 - 40 cm
800-00	0	40 - 45 cm
800-01	1	45 - 50 cm
800-02	2	50 - 55 cm

### **Beschreibung:**

BabyFLEX besteht aus Schulter- & Brustgurt, sowie medial und lateral verlaufende Beingurte mit und ohne Fußschoner. Die Beingurte sorgen für eine korrekte Bein- & Hüfthaltung. Mit BabyFLEX kann die Hüft-Knie-Beugung von über 90° bis 120° eingestellt werden.



**AIDAMED e. K.**  
Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg  
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11  
Fax: + 49 911 92 867 13  
www.aida-med.de

# „BabyFLEX“


## Pavlik-Bandage

**AIDAMED**  
Diagnostik - Therapie - Hygiene



### Anwendung:

- Vor dem ersten Anlegen werden alle Schließen von Brust-, (1) Schulter-(2), vordere- (3) und hintere Beingurten (4) geöffnet.
- Das Kind auf dem Rücken auf der BabyFLEX - Pavlik Bandage legen, so dass der Brustgurt (1) einen Fingerbreit unterhalb der Achsel und noch oberhalb der Brust geschlossen werden kann.
- Die Schultergurte (2) im Rücken überkreuzen, an der Schließen auf der Vorderseite befestigen, und die Längen anpassen.
- Die Beingurte(3) werden so angelegt, dass die Längsbänder parallel zur beiden Seiten der Unterschenkel über dem inneren, und äußeren Knöchel verlaufen.
- Das um den Fußunterseite herum verlaufende Gurtteil, muss einige Zentimeter vor der Fersenhinterkante, Richtung Fußmitte hin, positioniert sein.
- Die vorderen Beingurte (3), an der Innenseite verlaufend ,werden so am Brustgurt befestigt, dass ein Abspreizwinkel der Oberschenkel in den Hüftgelenken von 50°-55° je Beinseite entsteht.
- Die Befestigung der Beingurte muss vor der Achsellinie liegen.
- Nachfolgend werden die hinteren Beingurte (4), nach außen verlaufend, an der rückenseiteigen Schließen des Brustgurtes befestigt und angepasst.
- Die vorne-(3) und hinten-(4) verlaufenden Beingurte werden durch die zwei Verschlüsse (5) oberhalb der Ferse und um den Unterschenkel fixiert. Um eine korrekten Sitz zu gewährleisten, müssen diese Verschlüsse nicht zu locker angelegt werden.

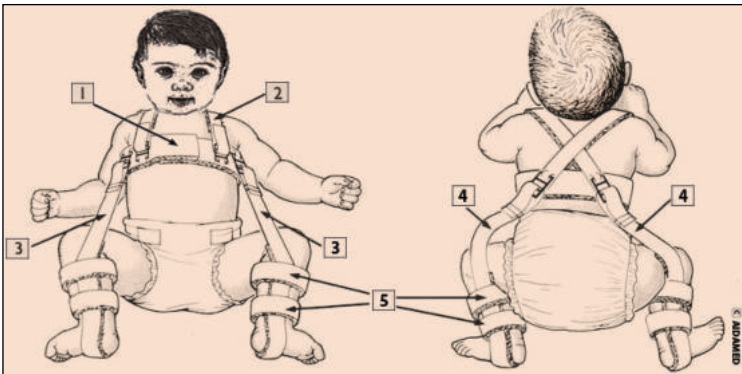

**BabyFLEX** - Pavlik-Bandage erfordert eine qualifizierte, individuelle und indikationsgerechte Anpassung an den Säugling durch entsprechendes ausgebildetes Fachpersonal.

### Material

- Gurte: Kunstleder oder PP Gurtband,
- Polster: PU- Schaum mit Charmeuse
- Klettverschlüsse: Velcro
- Schließen: Kunststoff

### Pflegeeigenschaften:

- **BabyFLEX**-Pavlik-Bandage lässt sich bei 30°C Feinwäsche waschen.

### Wichtig!

**KEIN WIEDEREINSATZ** - dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Säuglings bestimmt!



**AIDAMED e. K.**  
Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg  
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11  
Fax: + 49 911 92 867 13  
www.aida-med.de