

# IDEAL-Strapless

## Modellerweiterung

### Indikationen:

Behandlung von Hüftreifungsstörungen

Die Spreizbehandlung setzt ein stabiles Hüftgelenk voraus

Größe	Bauchumfang	Alter	Art.Nr.:
X0	bis 35 cm	Für Frühgeborene	500-X0-S
0	bis 42 cm	0 bis 4 Wochen	500-00-S
1	bis 50 cm	4 bis 8 Wochen	500-01-S
2	bis 55 cm	8 bis 12 Wochen	500-02-S
3	bis 57 cm	ab 10 Wochen	500-03-S

Tarif-Nr.: 35011011 (AT)

**Gr.X0**

**Gr.0**

**Gr.1**

Tarif-Nr.: 35011015 (AT)

**Gr.2**

Tarif-Nr.: 35011012 (AT)

**Gr.3**



## Eigenschaften:

Die **Ideal-Strapless**-Spreizbandage ist ein speziell für die Neugeborenen-Hüfte entwickeltes Hilfsmittel, mit der eine besonders schonende Behandlung einer Hüftfreifungsstörung beim Säuglingen erreicht wird.

Das Behandlungsprinzip besteht vor allem darin, die pränatale Beuge-Spreizstellung noch längere Zeit aufrechtzuerhalten um die wachstumsgestörten Pfannendächer zu entlasten.

Um dies zu erreichen, hat die **Ideal-Strapless**-Spreizbandage am Rückenteil beidseitig außen angebrachte Vorhaltekeile, die eine am Anfang der Behandlung erwünschte Beugung ermöglichen, und eine Überspreizung verhindern. Dadurch wird der Druck auf die Hüftpfanne vermindert und das Hüftgelenk kann gut ausreifen.

Die Beinzügel werden links und rechts am Bauchgurt befestigt. Dadurch entsteht eine mäßige Beugestellung und eine etwas vermehrte Abspreizung, jedoch nicht über 50°.

Die Eigendynamik des Säuglings ist durch die weiche Ausführung des Spreizbandage nicht aufgehoben

## Korrektes Anlegen:

- Das Kind soll am Rücken mittig auf der Bandage liegen
- Den Bauchgurt oberhalb vom Bauchnabel schließen
- Den Klettverschluß der Beinhalterung äußerst links und rechts am Bauchgurt befestigen
- Den seitlichen Klettverschluß zur Sicherung der Beinhalterung schließen
- Das Hilfsmittel über die normalen Anziehsachen anlegen
- Das Hilfsmittel muss straff am Körper liegen
- Ein konsequentes Tragen des Hilfsmittels ist unbedingt erforderlich (24 Stunden/ Tag)

## Produkt-Zusammenstellung:

Überzug:

Jersystoff-Baumwollgewebe

Waschbar bis 40° (Schonwaschgang)

Innenenteil:

Beinzügel aus PUR-Schaum mit Stabilisierung

Rückenverstärkung: PE-Folie und K-Schaum-Vorhaltekeilen

## Wichtiger Hinweis:

**KEIN WIEDEREINSATZ** - Dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt

